


AANPASHANDLEIDINGEN


Sferische lenzen

ACUVUE OASYS® 1-Day / 1-DAY ACUVUE® TruEye® / 1-DAY ACUVUE® MOIST /
ACUVUE OASYS® / ACUVUE® VITA™

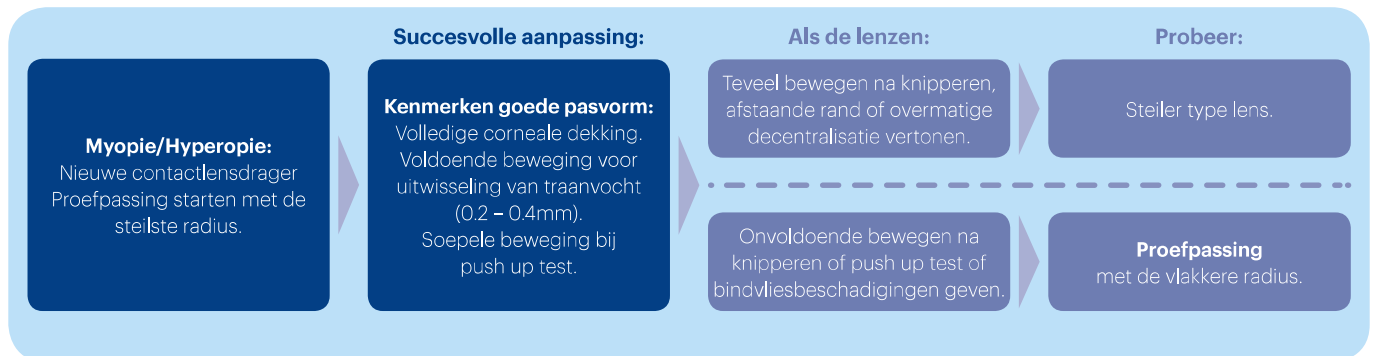

Torisch lenzen

1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM / ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM

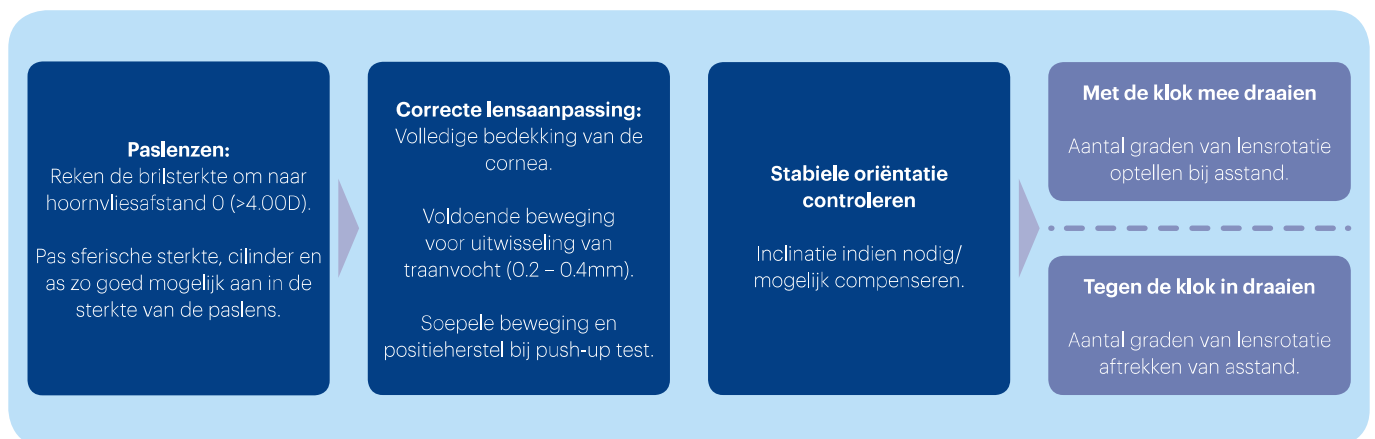





1-DAY ACUVUE® DEFINE®














1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL

1. Begin altijd met een subjectieve refractie en bepaal dan de meest positieve sferische sterkte voor de beste zichtscherpte. Houd rekening met de hoornvliesafstand bij sterkte hoger dan +/- 4.00D. Controleer of het astigmatisme lager is dan 1.00D.
2. Bepaal welk oog dominant is.¹
Aanbevolen methode is het gebruik van een nevelglas van +1.00D.
3. Bepaal de minimale leesadditie om de klant goed nabij te laten zien.
Houd rekening met het leesgedrag van de klant (computer, tablet, telefoon, etc...).
4. Indien op basis van de ervaring van de klant het zicht gemodificeerd moet worden, pas dan de modificatie stappen toe uit de rechter tabel.
5. Selecteer de eerste paslenzen op basis van de gevonden leesadditie en aan de hand van de onderstaande tabel (linker tabel).
Laat de klant minimaal 10 minuten buiten de aanpasruimte het zicht ervaren.

Voor optimaal zicht op alle afstanden		
ADDITIE	OOG	LENSKEUZE
+0.75D t/m +1.25D	Dominante oog	 LOW
	Niet-dominante oog	 LOW
+1.50D t/m +1.75D	Dominante oog	 MID
	Niet-dominante oog	 MID
+2.00D t/m +2.50D	Dominante oog	 MID
	Niet-dominante oog	 HIGH


Laat de klant tenminste 10 minuten buiten de aanpasruimte ervaren hoe het zicht met de proeflenzen is.

Indien een modificatie voor de verte en/of nabij nodig blijkt te zijn	
VERBETERING VOOR VERAF	VERBETERING VOOR NABIJ
1-DAY ACUVUE® MOIST SFERISCH	 LOW
 LOW	 LOW +0.25D
 LOW	 MID
 MID	 MID +0.25D
 MID	 MID
 MID +0.25D	 HIGH +0.25D

*Maximaal 4 proeflenzen in totaal
+: +0.25 optellen bij de sterkte voor zicht veraf voor het niet-dominante oog

1. Laat de klant naar de visuskaart kijken met de optimale (best sferische) correctie in de pasbril. Houd beurtelings een nevelglas van +1.00D voor beide ogen en vraag hoe het beeld wordt met het voorhouden van het nevelglas. Het oog waarbij het nevelglas de meeste visusverstoring geeft is het dominante oog. Indien mogelijk dient deze test in zowel hoog als laag contrast te worden afgenomen.